

## Multi-test na 12 typov drog

Testovanie prevádzajte vždy pri izbovej teplote (15-30°C). V intervale tejto teploty musí byť samotné testovacie zariadenie ako i odobratá vzorka moču skúmanej osoby.


### Prevedenie testu:

1. Odbalte opatrne testovacie zariadenie, a to tesne pred plánovaným testovaním vzorky.
2. Použite čistú nádobu na odobratie vzorky moču od testovacej osoby.
3. Vytiahnite ochranný uzáver zo spodnej časti testu tak, aby sa objavili testovacie pásiky (určené na ponorenie do vzorky moču).
4. Opatrne ponorte testovacie pásiky do vzorky moču (v smere a dĺžke naznačených šípok). Dávajte pozor, aby moč neprišiel do kontaktu s plastovým puzdrom testu (ponorte pásiky len do 50% ich vyčnievajúcej dĺžky). Nechajte test postojáčky absorbovať potrebné množstvo moču v priebehu **10-15 sekúnd**.
5. Po **15 sekundách** vyberte test zo vzorky moču a zasunite naspäť ochranný uzáver.
6. Položte test na rovné miesto a počkajte pokiaľ sa neobjavia farebné pružky (3-5 min.).
7. Negatívny výsledok (objaví sa farebný pružok pri **T**) možno zistiť okamžite. Na pozitívny výsledok (neobjaví sa farebný pružok pri T) musíte čakať min. **5 minút po vybratí testu zo vzorky moču**. Výsledky testu sú aktuálne (platné) max. do 10 minút po jeho použití.

### Výsledky

Na každom teste vidno dve písmena. '**C**' je kontrolným a '**T**' je testovacím pružkom. **Farebný kontrolný pružok by sa mal objaviť vždy (pri písmene C). Je to potvrdením toho, že test bol praktizovaný správne a možno sa spoliehať na jeho výsledky.** Ak sa tento farebný pružok neobjaví, znamená to, že test neukáže dôveryhodný výsledok. V tomto prípade je nutné test zopakovať.

**Ak sa na teste objaví (nezáleží na tom ako je silný) druhý farebný pružok (pri písmene T), znamená to, že test je negatívny (nenašla sa vzorka drogy).** Ak sa však **vôbec neobjaví druhý farebný pružok („T“)** a zároveň kontrolný pružok „C“ je platný (objaví sa), znamená to, že **test bol pozitívny (vzorka obsahuje prítomnosť drogy).**

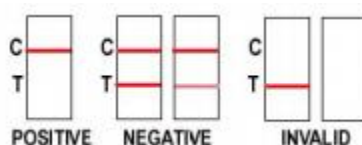

1. **Cocaine** (kokaín, crack, coca, coce, charlie)
2. **Amphetamines** (whizz, speed, amfetamín, amph)
3. **Methamphetamines** (Tik, Meth, ice, glass)
4. **Marijuana** (cannabis, THC, skunk, hašiš, tráva, ganja, puff, spliff, hash, marihuana)
5. **Methadone** (Symoron, Dolophine, Amidone, Heptadon, Phy)
6. **Ecstasy** (MDMA, extáza, éčko, koleso, koláč, E, X, XTC)
7. **Opiates** (heroín, morfín, kodeín, ópium, opiáty, smack, gear)
8. **Oxycodone** (OxyContin, Roxicodone, Percodan, Endodan, Roxiprin)
9. **Propoxyphene** (Dextropropoxyphene, analgetikum)
10. **PCP** (Phencyclidine, angel dust, anjelský prach, ketamín)
11. **Barbiturates** (barbituráty)
12. **Benzodiazepines** (BZO, benzo, sedatíva)