

JEDNODUCHÉ ODOBRATIE VZORKY

- vzorku neodoberajte počas hnačky !
 - vzorky zo stolice z toalety, pri ktorej sa stolica dostane do vody v toalete, nie sú vhodné, keďže rôzne WC čistiace prostriedky alebo podobné by mohli test znehodnotiť.
Pýtajte si od svojho lekára zachytávač stolice.
1. Etiketu na nádobke na vzorku označte menom a prezviskom, dátumom narodenia a dátumom, kedy bola vzorka odobraná.
 2. Odtočte vrchnák. Vo vrchnáku sa nachádza tyčinka na odobratie vzorky.
POZOR:Obsah nádoby na vzorku nerozlejte!
 3. Tyčinku na vzorku zastrčte **v jednom ťahu** do troch rôznych miest stolice.
 - 4.a **DOLEŽITÉ:** Vezmite vreckovku alebo trochu toaletného papiera a ako na obrázku pretiahnite tyčinku so vzorkou cez poskladanú vreckovku, aby bola odstranená nadmerne odobratá stolica.
 - 4.b Do nádoby sa má dostať iba množstvo stolice, ktoré sa zachytilo na zárezoch tyčinky.



5. Po utretí, tyčinku so vzorkou vložte znova do nádoby na vzorku, uzavrite a dobre premiešajte.