


Domáci test na určenie krvnej skupiny z kvapky krvi

ELDON HOME KIT 2511

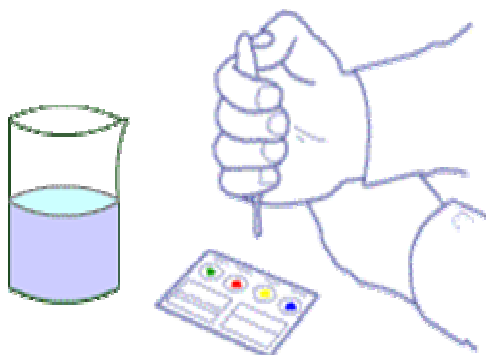


■ Krok č. 1

Otvorte test (ELDONCARD) zabalený vo fólii tesne pred plánovaným testovaním. Napíšte svoje meno na testovaciu kartičku. Pripravte si pohár s vodou. Priloženým kvapkadlom **kvapnite 1 kvapku vody do každého zo 4 farebných políčok** na karte. Nesmiete nechať vodu na teste vyschnúť (po kvapnutí je nutné test dokončiť bez zbytočných odkladov).

Krok č. 2 ■

Umyte si ruky mydlom a teplou vodou. Utrite si ich čistým uterákom. Prsty nesmú byť pred odberom krvi studené (môžete si ich trieť o seba). Priloženou jednorazovou ihlou **urobte vpich do prsta** (2x otočte zelený koniec ihly a vytiahnite ho von; priložte ihlu otvoreným koncom ku končeku prsta a stlačte biely koniec, pokiaľ nebudete počuť klik).

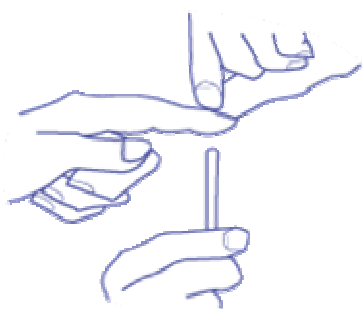



■ Krok č. 3

Počkajte cca 10 sekúnd pokiaľ rana nezačne krváčať. Stlačte prst smerom k ranke, aby začal viac krváčať. **Odoberte kvapku krvi pre každé testovacie políčko pomocou priloženej paličky ELDONstick®.** Pre každé farebné políčko použite novú tyčinku.

Krok č. 4 ■

Kvapka krvi musí pokrývať celú plochu testovacej paličky ELDONstick®. Kvapka nesmie byť príliš malá a ani príliš veľká, aby nepretekala po okraji tyčinky (viď obrázok vedľa).

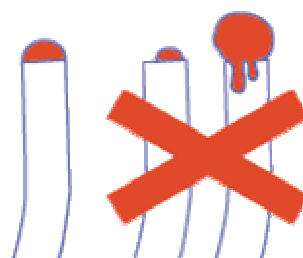

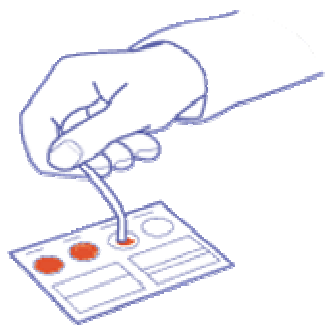


■ Krok č. 5

Priložte postupne testovaciu paličku s odobratou kvapkou krvi na testovacie políčko ELDONCARD® (1 palička na jedno políčko – nepoužívať 1 paličku na viacero políčok). Každú paličku podržte na políčku po dobu 10 sekúnd a hneď pokračujte krokom č. 6. Následne pokračujte ďalšími paličkami (4 x).

Krok č. 6 ■

Každou paličkou **roztrite na testovacom políčku celý obrázok krúživým pohybom** (až po naznačené hranice kruhu), a to po dobu cca 15 sekúnd. Počas tejto doby sa zmiešava odobratá vzorka krvi so vzorkou v testovacom políčku aktivovanou kvapkou vody.

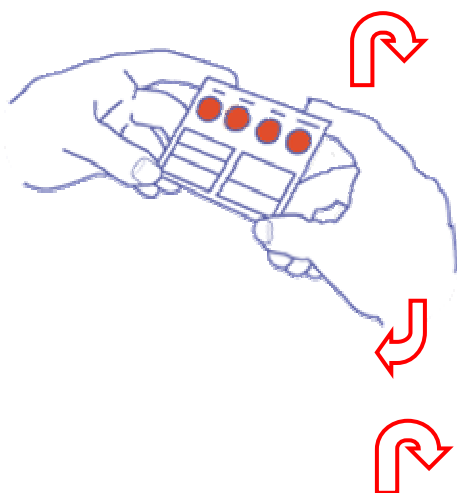

■ Krok č. 7

Nakloňte ELDONCARD® do vertikálnej polohy. Po 10 sekundách otočte ELDONCARD® o **180°** (stále vo vertikálnej polohe). Počkajte opäť 10 sekúnd a otočte ELDONCARD® o **90° vľavo** – počkajte opäť 10 sekúnd. Nakoniec ELDONCARD® otočte o **180° doprava** a čakajte ostatných 10 sekúnd. Celkovo táto fáza testu trvá **40 sekúnd** a slúži na dokonalé zmiešanie vzorky krvi s aktivačnou látkou (otáčaním vo vertikálnej polohe vo všetkých smeroch).

Krok č. 8 ■

Nechajte krv zaschnúť a **odčítajte výsledky porovnaním s tabuľkou** (po cca 2 až 10 min. od kroku č. 7). Výsledky testu si zapíšte na kartičku.

Prekryte výsledky testu priloženou priehľadnou samolepiacou fóliou kvôli zabráneniu zmeny výsledkov testu pôsobením vzduchu.

